

# Aptima® Multitest Entnahmekit

## Anleitung zur Probenahme durch den Arzt


### Entnahme von Rachenabstrichen




Öffnen Sie die Verpackung des Probenahmetupfers und entnehmen Sie diesen. Vermeiden Sie jegliche Berührung der Spitze und legen Sie den Tupfer nicht ab. **Wenn die weiche Spitze berührt, abgelegt oder fallen gelassen wird, benötigen Sie ein neues Aptima Multitest Entnahmekit.** Halten Sie den Tupfer, indem Sie ihn mit Daumen und Zeigefinger in der Schaftmitte an der Einkerbungslinie anfassen. Halten Sie den Schaft nicht unter der Kerblinie.

#### Anleitung zur Entnahme von Abstrichproben:


- *Chlamydia trachomatis* (CT)
- *Neisseria gonorrhoeae* (NG)

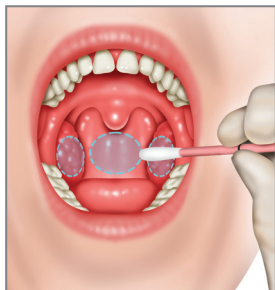

Führen Sie den Tupfer vorsichtig in den Mund des Patienten ein und stellen Sie sicher, dass er die beidseitigen Tonsillen (die Tonsillen an den beiden Seiten im Mund, sofern sie nicht entfernt wurden) und die Hinterseite des Rachens berührt. Ziehen Sie den Tupfer zurück, ohne dass er mit der Innenseite der Wangen oder der Zunge in Berührung kommt.

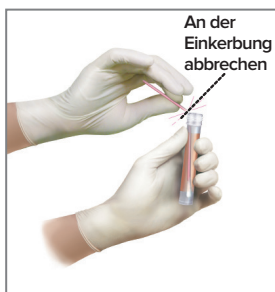

Halten Sie den Tupfer in der Hand und nehmen Sie den Schraubverschluss vom Probentransportröhrchen ab. Achten Sie darauf, den Inhalt des Röhrchens nicht zu verschütten. **Im Falle eines Verschüttens - Röhrchen entsorgen und ein neues Aptima® Multitest Probentransportröhrchen verwenden.** Tupferschaft an der Einkerbung gegen die Innenwand des Röhrchens drücken und an der Sollbruchstelle abbrechen. Oberen Schaftteil des Tupfers entsorgen.

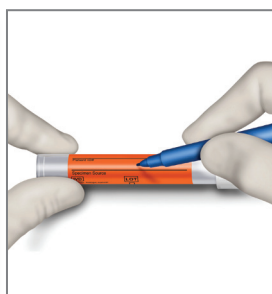

Schrauben Sie die Verschlusskappe fest auf das Röhrchen. Bei der Entnahme mehrerer Proben bei einem Patienten stellt das Feld zur Angabe der Probenherkunft auf dem Röhrchenetikett eine eindeutige Identifizierung des Probenahmeorts sicher.



Diese Anleitung zur Probenahme wird von Hologic ausschließlich für allgemeine Informationszwecke zur Verfügung gestellt; es handelt sich hierbei um keine verbindliche Anleitung oder Leistungsgarantie. Es liegt in der ausschließlichen Verantwortung des Arztes, die jeweilige Packungsbeilage zu lesen und die geltenden örtlichen, landes- und bundesweiten Vorschriften und Bestimmungen einzuhalten.

Diagnostic Solutions | [Hologic.com](http://Hologic.com) | [euinfo@hologic.com](mailto:euinfo@hologic.com)

DS-09496-DEU-DE Rev. 001 © 2019 Hologic, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Hologic, The Science of Sure, Aptima und die zugehörigen Logos sind Marken und/oder eingetragene Marken von Hologic, Inc. und/oder seinen Niederlassungen in den USA und/oder anderen Ländern. Diese Informationen richten sich an Ärzte und sind nicht als Produktangebot oder Werbung in Ländern vorgesehen, in denen dies in dieser Form nicht erlaubt ist. Da Materialien von Hologic über Websites, eBroadcasts und Messen verbreitet werden, ist es nicht immer möglich zu kontrollieren, wo diese Materialien erscheinen. Informationen über das verfügbare Produktangebot in einem bestimmten Land erhalten Sie bei Ihrem Hologic-Verehrer bzw. per E-Mail an [euinfo@hologic.com](mailto:euinfo@hologic.com).