


# Aptima<sup>®</sup> Multitest Entnahmekit

## Anleitung für Patienten zur Selbstentnahme



### Entnahme an der Harnröhrenöffnung

Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie Fragen zu diesem Vorgang haben.

### Vor dem Beginn Hände waschen.

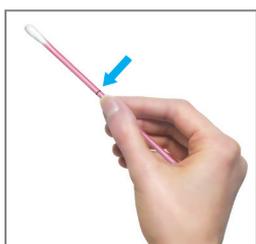


Öffnen Sie die Verpackung des Probenahmetupfers und entnehmen Sie diesen. Vermeiden Sie jegliche Berührung der Spitze und legen Sie den Tupfer nicht ab. **Wenn die weiche Spitze berührt, abgelegt oder fallen gelassen wird, müssen Sie ein neues Aptima Multitest Entnahmekit verwenden.** Halten Sie den Tupfer, indem Sie ihn mit Daumen und Zeigefinger in der Schaftmitte, an der schwarzen Einkerbungslinie, anfassen. Niemals unterhalb der Linie festhalten.

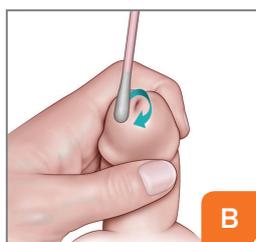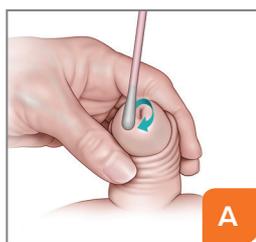

Halten Sie den Penis mit Ihrer freien Hand (Hand ohne Tupfer). Wenn Sie nicht beschnitten sind (A) müssen Sie vor der Probenahme die Vorhaut zurückschieben. Führen Sie mit dem Tupfer Rollbewegungen auf der Penisspitze aus bzw. um die Harnröhrenöffnung herum (B). Stellen Sie sicher, dass Sie den Tupfer vollständig um die Harnröhrenöffnung rollen, um eine bestmögliche Probe zu erzielen. Es ist nicht erforderlich, den Tupfer einzuführen.



Halten Sie den Tupfer in der Hand und schrauben Sie die Verschlusskappe vom Proben transportröhrchen ab. Achten Sie darauf, den Inhalt des Röhrchens nicht zu verschütten. **Im Falle eines Verschüttens müssen Sie ein neues Aptima Multitest Proben transportröhrchen verwenden.** Tauchen Sie den Tupfer sofort in das Röhrchen. Tupferschaft an der Einkerbung gegen die Innenwand des Röhrchens drücken und an der Sollbruchstelle abbrechen. Oberen Schaftteil des Tufpers entsorgen.

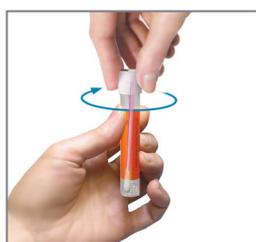

Schrauben Sie die Verschlusskappe fest auf das Röhrchen. Liefern Sie das Röhrchen nach den Anweisungen des Arztes ab.

Diese Anleitung zur Probenahme wird von Hologic ausschließlich für allgemeine Informationszwecke zur Verfügung gestellt; es handelt sich hierbei um keine verbindliche Anleitung oder Leistungsgarantie. Es liegt in der Verantwortung des Arztes, die jeweilige Packungsbeilage zu lesen und die geltenden örtlichen, landes- und bundesweiten Vorschriften und Bestimmungen einzuhalten.

Das Aptima Multitest Abstrich-Probenahmekit ist nicht für den Verkauf in den USA bestimmt.

Diagnostic Solutions | [Hologic.com](http://Hologic.com) | [euinfo@hologic.com](mailto:euinfo@hologic.com)

DS-08579-DEU-DE Rev.001 - ©2019 Hologic, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Hologic, The Science of Sure, Aptima und die zugehörigen Logos sind Marken und/oder eingetragene Marken von Hologic, Inc. und/oder seinen Niederlassungen in den USA und/oder anderen Ländern. Diese Informationen richten sich an Ärzte außerhalb der USA und sind nicht als Produktangebot oder Werbung in Ländern vorgesehen, in denen dies in dieser Form nicht erlaubt ist. Da Materialien von Hologic über Websites, eBroadcasts und Messen verbreitet werden, ist es nicht immer möglich zu kontrollieren, wo diese Materialien erscheinen. Informationen über das verfügbare Produktangebot in einem bestimmten Land erhalten Sie bei Ihrem Hologic-Vereiner bzw. per E-Mail an [diagnostic.solutions@hologic.com](mailto:diagnostic.solutions@hologic.com).

# Aptima® Multitest Entnahmekit

## Anleitung zur Selbstentnahme für Patientinnen


### Vaginale Entnahme

Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie Fragen zu diesem Vorgang haben.

### Vor dem Beginn Hände waschen.



Öffnen Sie die Verpackung des Probenahmetupfers und entnehmen Sie diesen. Vermeiden Sie jegliche Berührung der Spitze und legen Sie den Tupfer nicht ab. **Wenn die weiche Spitze berührt, abgelegt oder fallen gelassen wird, müssen Sie ein neues Aptima Multitest Entnahmekit verwenden.** Halten Sie den Tupfer, indem Sie ihn mit Daumen und Zeigefinger in der Schaftmitte, an der schwarzen Einkerbungsline, anfassen. Niemals unterhalb der Linie festhalten.

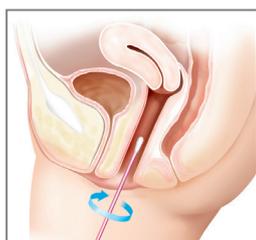

Führen Sie den Tupfer vorsichtig ca. 5 cm in die Scheide ein und drehen Sie ihn sanft für 10 bis 30 Sekunden. Stellen Sie sicher, dass der Tupfer die Scheidenwände berührt, damit er Sekret aufnimmt. Ziehen Sie den Tupfer zurück, ohne die Haut zu berühren.



Halten Sie den Tupfer in der Hand und nehmen Sie den Schraubverschluss vom Probenentransportröhrchen ab. Achten Sie darauf, den Inhalt des Röhrchens nicht zu verschütten. Im **Falle eines Verschüttens - Röhrchen entsorgen und ein neues Aptima® Multitest Probenentransportröhrchen verwenden.** Tupferschaft an der Einkerbung gegen die Innenwand des Röhrchens drücken und an der Sollbruchstelle abbrechen. Oberen Schaftteil des Tupfers entsorgen.



Schrauben Sie die Verschlusskappe fest auf das Röhrchen. Liefern Sie das Röhrchen nach den Anweisungen des Arztes ab.